





## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦА И ГЛАЗ в период распространения вирусных инфекций

**Очки защитные и экраны лицевые (щитки) - изделия многократного применения.**  
Необходима правильная и своевременная дезинфекция.  
Обработка обеззараживающими средствами увеличит защитные свойства СИЗ, снизит риск заражения инфекцией.

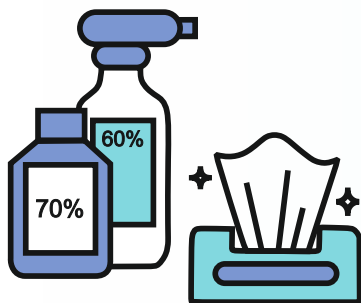

Очки защитные, экраны лицевые (щитки) многократного применения обеззараживаются путем протирания каждые 2 часа с использованием спиртосодержащих дезинфекционных средств с концентрацией спирта этилового не менее 70%, изопропилового - не менее 60%

30 мин.

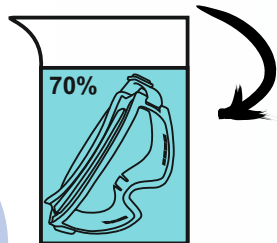

После использования защитные очки, экраны лицевые (щитки), обеззараживаются способом двукратного протирания с интервалом 15 минут 6% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства или погружением в 70% этиловый спирт на 30 минут



После обеззараживания защитные очки, экраны лицевые (щитки), промываются теплой водой с любым моющим средством



Сушить средства защиты следует в положении, обеспечивающем свободный сток воды